

medical line



ORLETT

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

**БАНДАЖ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ
ПАХОВОГО ГРЫЖЕВОГО ДЕФЕКТА**

НВ-484

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бандаж Orlett грыжевой паховый, двухсторонний, со съёмными пелотами предназначен для легкой степени фиксации и поддержки грыжевого выпячивания. Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- профилактика ущемления паховых прямых и косых грыж при подъеме тяжестей, кашле, натуживании и иных физических нагрузках;
- профилактика ущемления бедренных грыж при подъеме тяжестей, кашле, натуживании и иных физических нагрузках;
- профилактика прогрессирования паховых грыж;
- профилактика рецидивов заболевания.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения назначает лечащий врач. Рекомендованный режим ношения: в течение всего дня, обязательно при физической нагрузке, запорах и кашле. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Невправимые грыжи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. В случаях гнойных заболеваний и/или заболеваний кожи в области применения бандажа необходима консультация лечащего врача. При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует временно прекратить ношение бандажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

КОНСТРУКЦИЯ

Бандаж Orlett грыжевой паховый, двухсторонний, со съёмными пелотами изготовлен из прочного медицинского полотна с высоким содержанием хлопка.

На рисунке отмечены следующие элементы конструкции:

1. пояс с застежкой-липучкой велкро;
2. подбедренные лямки с застежками-липучками велкро;
3. два кармана для съемных подушечек-пелотов;
4. две пары пелотов.

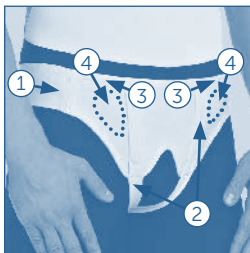


ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Бандаж одевается лежа на спине с приподнятым тазом, после вправления грыжевого выпячивания.

В зависимости от расположения и величины грыжевых дефектов в соответствующие кармашки бандажа вставить один или два пелота (справа, слева, с двух сторон).

1. На область грыжевого отверстия наложить пелот бандажа.
2. Застегнуть пояс на бедрах, подбедренные лямки пропустить между ног и застегнуть сзади на поясе при помощи застежек-липучек велкро.

ПРАВИЛА ПОДБОРА

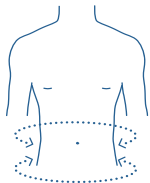

Сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измеряется окружность талии и бедер.

Согласно полученным результатам подобрать необходимую модель бандажа Orlett по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Сумма окружностей талии и бедер, деленная пополам, см
S	до 85
M	85-95
L	95-105
XL	105-115

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



СОСТАВ

50% хлопок, 20% эластан, 15% полиамид, 15% этиленвинилацетат.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. НВ-484, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74410 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

